


Pruebas de droga
5 sust. y 6 sust. (incluye ALCOHOL)

Nuestro producto está almacenado en **bodegas climatizadas** para garantizar resultados confiables.

MODO DE USO - PASOS A SEGUIR




Sumerja la tarjeta en el recipiente con la muestra por 10 segundos.

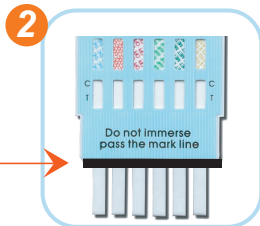

Atención: Sumergir la tarjeta hasta llegar a la altura de la línea marcada, de esta manera evitamos que la prueba resulte inválida.




Retire del recipiente la tarjeta de la muestra y espere 5 minutos

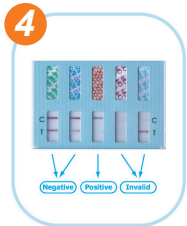

Proceda a leer los resultados

SIMBOLOGIA DE RESULTADOS:

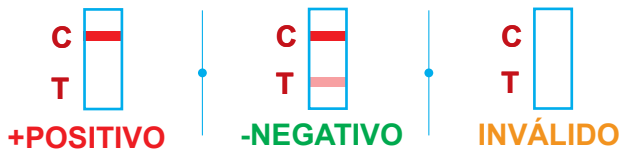

Nuestros tests de drogas están disponibles en tarjetas para la lectura de:

5 Sustancias		6 Sustancias (+Alcohol)	
Anfetamina	AMP	Anfetamina	AMP
Cocaína	COC	Cocaína	COC
Marihuana	THC	Marihuana	THC
Opiáceo	OPI	Opiáceo	OPI
Heroína, H, Codeína, Oxycodona, Morfina, Hidrocodona y Fentanilo		Heroína, H, Codeína, Oxycodona, Morfina, Hidrocodona y Fentanilo	
Metanfetamina	MET	Metanfetamina	MET
		Alcohol <small>Item nuevo</small>	ETG

NOTA IMPORTANTE: La intensidad de las líneas en el resultado del test varían algunas veces debido a:

Cuan diluída esté la orina, el nivel de PH o proteína de la misma o en su defecto si sumergen la tarjeta más arriba de la línea marcada.

La interferencia de un metabolito (molécula en el organismo) en la orina que se asemeje a la droga.

PREGUNTA MAS FRECUENTE:

Si las líneas en los recuadros del test son muy débiles. Significa que el resultado es negativo?.

No importa que tan débil sea la línea en los recuadros. Eso equivale a un resultado negativo en la prueba.



PRESENTACIONES PRUEBAS DE DROGA A ELEGIR AHORA PARA DETECTAR ALCOHOL

OPCIÓN 1.-
1 Tarjeta prueba de droga. (Sellada)



OPCIÓN 2 - Kit con funda ziploc

A.- 1 Funda Ziploc B.- 1 Tarjeta prueba de droga
C.- 1 Guante de látex D.- 1 Vasito muestra de orina

